



Breathe Right® Näsplåster.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda **Breathe Right Näsplåster**. Om du har några frågor, kontakta läkare eller apotekspersonal.

1. Vad är Breathe Right Näsplåster och vad används det till?

Breathe Right Näsplåster är helt fria från läkemedel. Det är kliniskt bevisat att plåstret öppnar upp näsan så att du kan andas lättare. **Breathe Right Näsplåster** har fjäderande remsor som försiktigt lyfter och öppnar upp näsan så att luften lättare kan passera.

Breathe Right Näsplåster kan användas både dag och natt för att motverka täppt näsa orsakad av allergier eller förkylning.

Används för behandling av:

- Nästäppa

Breathe Right Näsplåster öppnar upp näsan och underlättar andningen genom att tillfälligt lindra nästäppa orsakad av förkylning eller allergi.

Breathe Right Näsplåster kan ge tillfällig lindring av symtom på täppt näsa eller andningssvårigheter på grund av skev näsvägg. De ska inte ses som ett alternativ till kirurgiskt ingrepp.

- Snarkning

Genom att underlätta andningen genom näsan istället för munnen, kan **Breathe Right Näsplåster** hjälpa till att minska eller till och med förhindra snarkning. För bästa resultat för att förhindra snarkning rekommenderas användning under natten.

Breathe Right Näsplåster kan användas med alla läkemedel.

2. Hur Breathe Right Näsplåster ska användas

För engångsbruk — varje plåster får endast användas en gång. Kan användas både dag och natt. Placera plåstret korrekt för att få bästa resultat. Var uppmärksam på att inte placera plåstret varken för högt eller lågt. De speciella fjäderande remsorna öppnar försiktigt upp näsan.



Rengöring: Tvätta och torka näsan för att avlägsna smuts och fett (använd ansiktssvatten om du har fet hud).

1



Placering: Ta bort skyddsplasten och placera plåstret på näsan.

2



Applicering: Tryck ned sidorna och gnugga försiktigt så att plåstret fäster ordentligt.

3

Borttagning: Ta bort Breathe Right Näsplåster när du tvättar ansiktet med varmt vatten eller tar en dusch. Ta alltid bort plåstret långsamt. Lossa ändarna försiktigt och lyft sedan upp plåstret från båda sidorna. Ta bort plåstret noggrant med vatten för att minska risken för hudreaktioner och skador.

4

Små/medelstora näsremor passar 75 % av näsor, stora näsremor är för vuxna med större näsa.

Speciellt fjäderliknande band lyfter försiktigt öppna näsgångar.

Använd genomskintlig variant för torr/känslig hud.

3. För din säkerhet

Varningar och försiktighet.

- Endast för utvärtes bruk.
- Använd inte på sår, solskadad eller irriterad hud.
- Sluta använda plåstret om du får utslag eller hudirritationer.
- Använd högst 12 timmar per dag.
- För bästa resultat ska varje plåster endast användas en gång. Efter avlägsning förlorar plåstret sin vidhäftningsförmåga och kommer inte att sitta på plats.

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämpar sig inte för barn under 5 år.
- Förpackningen innehåller naturligt gummi (latex) som kan orsaka allergiska reaktioner.
- Vid frågor kring användandet av denna produkt, kontakta hälso- och sjukvårdspersonal.

ANVÄND INTE

Om du är överkänslig mot latex eller **Breathe Right Näsplåster**.

Sömnapné: **Breathe Right Näsplåster** lämpar sig inte för behandling av sömnapné. Personer med symtom på sömnapné bör konsultera läkare.

En del personer kan uppleva biverkningar när de använder **Breathe Right Näsplåster**. Dessa kan vara reaktioner på huden där plåstret appliceras (t.ex. rodnad, irritation, smärta, flagnad hud, blödning, skrapsår eller missfärgning) och överkänslighetsreaktioner såsom utslag, klåda och svullnad i ansiktet.

Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med denna produkt ska rapporteras till tillverkaren och till Läkemiddelsverket. Det är viktigt att rapportera händelser eftersom det kan bidra till att upptäcka fel på denna medicintekniska produkt och kan förhindra att liknande händelser inträffar igen.

4. Hur Breathe Right Näsplåster ska förvaras



Förvaras vid högst 30 °C.
Förvaras i originalförpackningen.

Använd inte produkten efter bäst före-datumet som visas på förpackningen. Kassera produkten enligt lokala föreskrifter och ta alltid hänsyn till miljön.

5. Ytterligare information

Varje plåster packas i en individuell förpackning och kallförseglas med klister. De kallförseglade förpackningarna packas i kartonger.



Varning: Innan du använder denna produkt, läs noga igenom instruktionerna som finns i förpackningen.



Använd inte om förpackningen är skadad.



Engångsbruk: Plåsterna ska endast användas en gång.



Skyddspappret kan innehålla naturligt gummi (latex).



Lot nummer: Se kartong.



Bäst före-datum uttryckt som ÅÅÅÅ-MM



Foundation Consumer Brands, LLC, Pittsburgh, PA 15212, USA.



Brandshapers Ltd, Ardavan, Co. Wexford, Y35 Y19A, Ireland.

Bräuner FMCG, Ribovej 7, 6950 Ringkøbing, Denmark.

www.breatheright.com



Medicinteknisk produkt datum: Februari 2021.

Varumärken som ägs eller licensieras av FCB.
©2021 FCB eller licensgivare.

31050416