

HENGITÄ PAREMMIN MILLOIN JA MISSÄ VAIN

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin käytät Breathe Right® Nenäteippiä.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Breathe
Right®
NENÄTEIPPI

1 Mikä Breathe Right Nenäteippi on, ja mihin sitä käytetään?

Lääkkeettömän **Breathe Right Nenäteipin** on kliinisesti testattu avaavan nenän käytävät välittömästi, niin että voit hengittää helpommin. **Breathe Right Nenäteippi** on joustavaa jousimaista teippiä, joka kohottaa ja aukaisee nenän käytävät hellävaraisesti mandollistaen paremman ilmapirtauksen.

Breathe Right Nenäteippiä voi käyttää päivällä tai yöllä allergiasta tai vilustumisesta johtuvaan tukkoisuuteen. Suositellaan käytettäväksi, jos kärsit:

• Nenän tukkoisuudesta

Breathe Right Nenäteippi avaa nenän ja helpottaa hengittämistä lievittäen väliaikaisesti vilustumisen tai allergian aiheuttamaa nenän tukkoisuutta.

Breathe Right Nenäteippi voi väliaikaisesti lievittää vinon nenäseinämän aiheuttamaa tukkoisuutta tai hengitysvaikeuksia. Se ei ole vaihtoehto kirurgiselle toimenpiteelle.

• Kuorsamisesta

Helpottamalla hengittämistä nenän kautta, suun kautta hengittämisen sijaan, **Breathe Right Nenäteippi** voi vähentää tai jopa estää kuorsauksia. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sitä on suositeltavaa käyttää öisin.

Breathe Right Nenäteippiä voi käyttää minkä tahansa lääkityksen kanssa.

2 Miten Breathe Right Nenäteippiä käytetään

Kertakäyttöinen – jokaista teippiä tulee käyttää vain kerran. Voidaan käyttää päivällä tai yöllä. Laastarin asettaminen oikein varmistaa, että saat parhaimman tuloksen. Ole huolellinen että et aseta teippiä liian korkealle tai matalalle. Erityinen jousimainen teippi avaa nenäkäytävät hellävaraisesti.


Pienet / keskisuuret nenäteipit sopivat 75 %:lle nenistä, suuret nenäteipit ovat aikuisille, joilla on suurempi nenä.

Erityinen jousimainen teippi nostaa varovasti avoimet nenäkäytävät. Käytä kirkasta vaihtoehtoa kuivalle / herkälle iholle.

3 Turvallisuutesi vuoksi

Varoitukset ja varotoimet

- Vain ulkoiseen käyttöön.
- Älä käytä haavaumille, auringon polttamalle tai ärsyntyneelle iholle.
- Lopeta teipin käyttö, jos sinulla ilmenee ihottumaa tai ihoärsytystä.
- Ei saa käyttää yli 12 tuntia vuorokaudessa.
- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi jokaista teippiä saa käyttää vain kerran. Poistamisen jälkeen teippi menettää tarttuvuutensa eikä pysy paikoillaan.
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Ei alle 5-vuotiaille lapsille.
- Tämän tuotteen pakkaus sisältää luonnonkumia (lateksia), joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.
- Jos sinulla on kysyttävää tämän tuotteen käytöstä, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

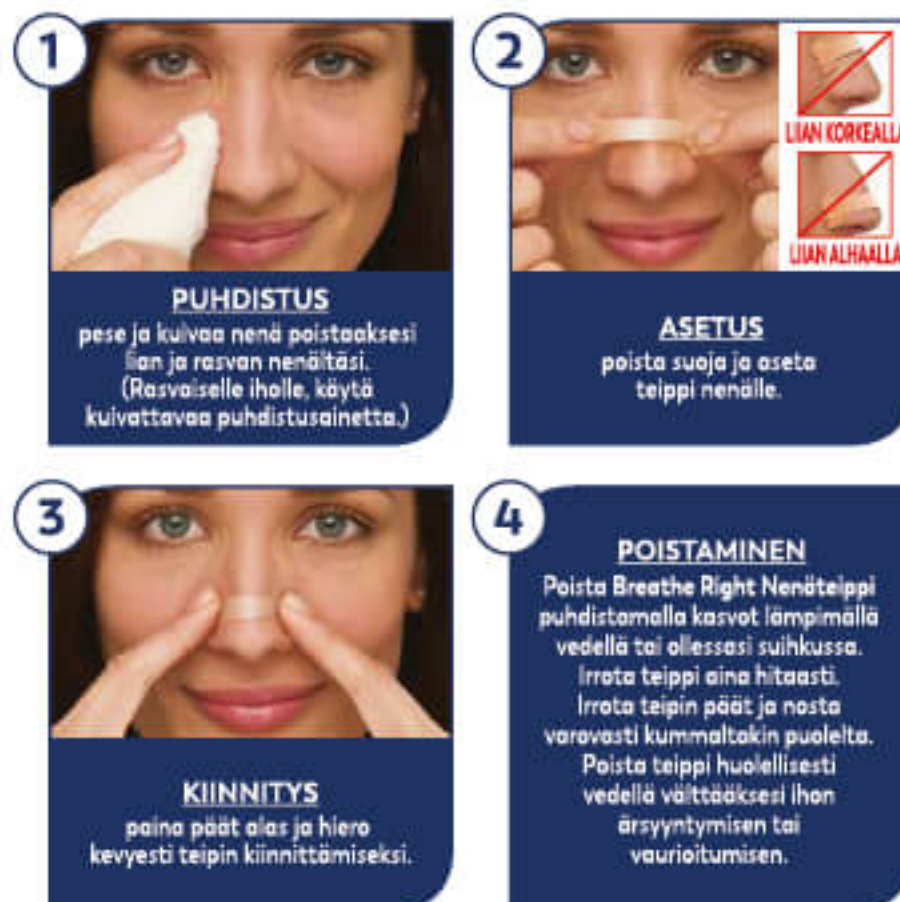

ÄLÄ KÄYTÄ

Jos olet yliherkkä lateksille tai **Breathe Right Nenäteipille**.

Uniapnea: **Breathe Right Nenäteippi** ei ole tarkoitettu uniapnean hoitoon. Henkilöiden, joilla esiintyy uniapnean oireita, tulee kysyä neuvoo lääkäritä.

Jotkut henkilöt voivat saada haittavaikutuksia käyttäessään **Breathe Right Nenäteippiä**. Nämä voivat olla käyttökohdan reaktioita (esim. punoitusta, ärsytystä, kipua, ihon hilseilyä, kuorittumista, verenvuotoa, rupeutumista tai värjäytymistä) ja yliherkkyysoireita kuten ihottuma, kutina ja kasvojen turvotus.

Kaikista tästä tuotteesta johtuvista vakavista haittavaikutuksista on ilmoitettava valmistajalle. On tärkeää ilmoittaa haittavaikutuksista, sillä se voi auttaa havaitsemaan tämän lääkinnällisen laitteen virheet ja estää vastaavien tapausten toistumisen.

4 Miten Breathe Right Nenäteippiä säilytetään

30 °C Säilytä alle 30 °C.
Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Tuotetta ei saa käyttää pakkauksen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Hävitä tuote paikallisten vaatimusten mukaisesti ympäristö huomioiden.

5 Lisätietoja

Nenäteipit on pakattu yksittäispakkauksiin, jotka on kylmäsinetöity liimalla. Kylmäsinetöidyt yksittäispakkaukset on pakattu pahvikoteloon.

⚠ Varoitus: Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue pakkauksessa oleva käyttöohje huolellisesti.

⊗ Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.

⌘ Kertakäyttöinen: Nenäteippiä tulee käyttää vain kerran.

LATEX Suojapaperi saattaa sisältää luonnonkumia (lateksia).

LOT Eränumero: Katso pakkaus.

⌚ Viimeinen käyttöpäivä on muodossa VVVV-KK

Foundation Consumer Brands, LLC, Pittsburgh, PA 15212, USA.

EC REP Brandshapers Ltd., Ardavan, Co. Wexford, Y35 Y19A, Ireland.

Medifront Oy, P.O. Box 20, FI-03601, Karkkila, Finland.

www.breatheright.com



MD Lääkinnällinen laite:
Marraskuu 2024

Tavaramerkki, jonka omistaa FCB. © 2024 FCB.

ANDAS BÄTTRE, NÄR SOM HELST OCH VAR SOM HELST

Läs noga igenom denna bipackssedel innan du börjar använda Breathe Right Näsplåster
Om du har några frågor, kontakta läkare eller apotekspersonal.

**Breathe
Right®**
NÄSPLÅSTER

1 Vad är Breathe Right Näsplåster och vad används det till?

Breathe Right Näsplåster är helt fria från läkemedel. Det är kliniskt bevisat att plåstret öppnar upp näsan så att du kan andas lättare. **Breathe Right Näsplåster** har fjädrande remsor som försiktigt lyfter och öppnar upp näsan så att luften lättare kan passera.

Breathe Right Näsplåster kan användas både dag och natt för att motverka täppt näsa orsakad av allergier eller förkylning.

Används för behandling av:

• Nästäppa

Breathe Right Näsplåster öppnar upp näsan och underlättar andningen genom att tillfälligt lindra nästäppa orsakad av förkylning eller allergi.

Breathe Right Näsplåster kan ge tillfällig lindring av symtom på täppt näsa eller andningssvårigheter på grund av skev näsvägg. De ska inte ses som ett alternativ till kirurgiskt ingrepp.

• Snarkning

Genom att underlätta andningen genom näsan istället för munnen, kan **Breathe Right Näsplåster** hjälpa till att minska eller till och med förhindra snarkning. För bästa resultat för att förhindra snarkning rekommenderas användning under natten.

Breathe Right Näsplåster kan användas med alla läkemedel.

2 Hur Breathe Right Näsplåster ska användas

För engångsbruk – varje plåster får endast användas en gång. Kan användas både dag och natt. Placera plåstret korrekt för att få bästa resultat. Var uppmärksam på att inte placera plåstret varken för högt eller lågt. De speciella fjädrande remsorna öppnar försiktigt upp näsan. Små/medelstora näsremsor passar 75% av alla näsor. Stora näsremsor är för vuxna med större näsa. Speciellt fjäderliknande band lyfter försiktigt öppna näsgångar. Använd genomskinlig variant för torr/känslig hud.

3 För din säkerhet

Varningar och försiktighet.

- Endast för utvärtes bruk.
- Använd inte på sår, solskadad eller irriterad hud.
- Sluta använda plåstret om du får utslag eller hudirritationer.
- Använd högst 12 timmar per dag.
- För bästa resultat ska varje plåster endast användas en gång. Efter avlägsning förlorar plåstret sin vidhäftningsförmåga och kommer inte att sitta på plats.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämpar sig inte för barn under 5 år.
- Förpackningen innehåller naturligt gummi (latex) som kan orsaka allergiska reaktioner.
- Vid frågor kring användandet av denna produkt, kontakta hälso- och sjukvårdspersonal.



ANVÄND INTE

Om du är överkänslig mot latex eller **Breathe Right Näsplåster**.

Sömnapné: **Breathe Right Näsplåster** lämpar sig inte för behandling av sömnapné. Personer med symtom på sömnapné bör konsultera läkare.

En del personer kan uppleva biverkningar när de använder **Breathe Right Näsplåster**. Dessa kan vara reaktioner på huden där plåstret appliceras (t.ex. rodnad, irritation, smärta, flagnad hud, blödning, skrapår eller missfärgning) och överkänslighetsreaktioner såsom utslag, klåda och svullnad i ansiktet.

Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med denna produkt ska rapporteras till tillverkaren och till Läkemedelsverket. Det är viktigt att rapportera händelser eftersom det kan bidra till att upptäcka fel på denna medicintekniska produkt och kan förhindra att liknande händelser inträffar igen.

4 Hur Breathe Right Näsplåster ska förvaras

30 °C Förvaras vid högst 30 °C.
Förvaras i originalförpackningen.

Använd inte produkten efter bäst före-datumet som visas på förpackningen.

Kassera produkten enligt lokala föreskrifter och ta alltid hänsyn till miljön.

5 Ytterligare information

Varje plåster packas i en individuell förpackning och kalförseglas med klister. De kalförseglade förpackningarna packas i kartonger.

- ⚠ Varning: Innan du använder denna produkt, läs noga igenom instruktionerna som finns i förpackningen.
- ⊗ Använd inte om förpackningen är skadad.
- ⌛ Engångsbruk: Plåsterna ska endast användas en gång.
- ⚠ LATEX Skyddspappret kan innehålla naturligt gummi (latex).
- LOT Lot nummer: Se kartong.
- 🕒 Bästa före-datum uttryckt som ÅÅÅÅ-MM
- 🏭 Foundation Consumer Brands, LLC, Pittsburgh, PA 15212, USA.
- EC REP Brandshapers Ltd., Ardavan, Co. Wexford, Y35 Y19A, Ireland.
- 🌐 Bräuner FMCG, Ribovej 7, 6950 Ringkøbing, Denmark.

www.breatheright.com



MD Medicinteknisk produkt
Datum: November 2024

Varumärken som ägs av FCB. © 2024 FCB.

102224
31056086